

Запись ПО «Встроенное программное обеспечение Модуля АД монитора медицинского МИТАР-01-«Р-Д»» в Модуль АД МИТАР-01-«Р-Д»

Запись ПО Модуля АД монитора МИТАР-01-«Р-Д» bpstep:

Запись до впаивания: невозможно.

Запись в плате: Компьютер с ОС – WINDOWS, программатор PICkit4 + MPLAB IPE. Подключить PICkit4 к плате и к ПК, подать питание на плату, запустить MPLAB IPE, выбрать device: AVR128DA28, загрузить hex-файл bpstepavr.X.production.hex, нажать «Program».